

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДИАГНОСТИКИ

для взрослых пациентов с солидными опухолями*



Уважаемый доктор!

В рамках программы вы можете **направить материал** на диагностику драйверных мутаций и определение экспрессии PD-L1 для пациентов с **немелкоклеточным раком легкого, меланомой и раком молочной железы**.

КАКИЕ ОБРАЗЦЫ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА ИССЛЕДОВАНИЕ?

| Нозологии | Маркеры | Критерии для включения в программу |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Рак молочной железы | HER2 (SISH), PD-L1 (клон SP142) | Для проведения PD-L1 тестирования: местнораспространенный неоперабельный ТНРМЖ, метастатический ТНРМЖ (4 стадия) |
| Меланома | BRAF | Распространенность – метастатический Стадия 3 или 4 |
| Немелкоклеточный рак легкого | ALK, PD-L1 | Для определения мутации в гене ALK: Тип: неплоскоклеточный Стадии: IIIb-IV Для определения экспрессии белка PD-L1: Тип: плоскоклеточный и неплоскоклеточный Стадии: II-IV |

Если у вас есть вопросы по заявкам на тестирование или иные вопросы по работе программы, просим вас обращаться по телефону горячей линии **8 (800) 100-68-53** (с 06:00 до 18:00 по московскому времени).

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ БИОМАТЕРИАЛ НА ИССЛЕДОВАНИЕ?

ЕСТЬ ДВА СПОСОБА:

- 1. Необходимо позвонить по бесплатному номеру Горячей линии проекта 8 (800) 100-68-53** (с 06:00 до 18:00 по Мск); предоставить контактную информацию, с указанием электронной почты для последующей отправки результатов исследований. В дальнейшем вам достаточно будет только представиться.
- 2. Самостоятельно зарегистрировать биоматериал пациента в базе данных проекта,** запросив индивидуальный доступ в базу данных по телефону Горячей линии **8 (800) 100-68-53**. После получения логина и пароля, войти в электронную базу данных можно по [ссылке](#).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ БУДЕТ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ДЛЯ ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛА?

1. Письменное согласие пациента на обработку персональных данных и передачу биологического материала на исследования – 2 экземпляра, подписанное пациентом, либо его представителем
2. Направление на исследование, подписанное врачом

Формы сопроводительных документов для заполнения **будут направлены на электронную почту после обращения в программу.**

ЧТО НЕОБХОДИМО ПОЛОЖИТЬ В ПОСЫЛКУ/ПЕРЕДАТЬ В ЛАБОРАТОРИЮ?

1. Биологический материал (блоки и стекла с образцами опухолевой ткани) подготовленный согласно требованиям лаборатории, промаркированный и тщательно упакованный. Гистологические блоки/стекла, направительные бланки должны быть промаркированы. **Номер маркера упакованного блока/стекла должен совпадать с аналогичным номером на направлении и соответствовать номеру заключения патогистологического исследования.**
2. Сопроводительные документы согласно списку выше. **Без сопроводительных документов отправленные образцы не подлежат исследованию.**

ЛАБОРАТОРИИ, ГДЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ:

- ✓ ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва
- ✓ Медицинский Институт имени Березина Сергея (ЛДЦ МИБС), г. Санкт-Петербург
- ✓ ГБУ РО «ПАБ» – ГБУ РО «Патологоанатомическое бюро», г. Ростов-на-Дону

Сроки тестирования: 10 дней

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
06:00 – 18:00 (Мск)

8 (800) 100-68-53

*Технический оператор [АО «Астон Консалтинг»](#) при поддержке АО «Рош Москва»

©АО «Рош-Москва», 2023 г.

Данная памятка предназначена только для медицинских работников и не должна передаваться пациентам. Данная программа не имеет целью способствовать продвижению какой-либо продукции/услуг компании «Рош», носит информационный характер и направлена на повышение доступности молекулярно-генетических исследований для пациентов. Участие в программе само по себе не является основанием для принятия каких-либо решений о применении какого-либо препарата. Вы получили данное письмо от компании АО «Рош-Москва», потому что дали согласие на рассылку информационных сообщений. Если Вы не хотите получать от АО «Рош-Москва» сообщения, касающиеся редких опухолей, перейдите по [ссылке](#), чтобы отписаться от рассылки.

С Политикой по обработке персональных данных компании «Рош» можно ознакомиться по [ссылке](#). Если у Вас есть вопрос, Вы можете задать его в [службу медицинской информации](#).

АО «Рош-Москва»
107031, Россия, г. Москва, Трубная площадь, дом 2,
помещение I, этаж 1, комната 42, МФК «Галерея Неглинная»
Тел. +7 (495) 229-29-99
www.roche.ru

M-RU-00012488, июль 2023 г.